

(01ES-XS, 01ES-S, 01ES-M, 01ES-L, 01ES-XL)

Aircast® AirSelect™ Short

AirSelect™ Short:

- Para nivel moderado de apoyo.
- Diseñado específicamente para ayudar a las fracturas estables de la parte inferior de la pierna, el pie y el tobillo; Torcedura severa de tobillo; y uso postoperatorio.
- Panel frontal preinflado dos celdas de aire distales.

Información de USO

Un calcetín de algodón o para escayola aumenta la comodidad (NO SE INCLUYE)
 Consulte el manual de instrucciones para advertencias y precauciones.

Preparación de bota Airselect

- Desate las correas, retire el panel delantero y abra el forro.

1

Coloque la ortesis

- Siéntese y coloque el pie en la ortesis. Asiente el talón contra la parte posterior de la ortesis. Envuelva el forro alrededor del pie y del tobillo (Fig. A).
- Vuelva a colocar el panel delantero: coloque el panel delantero de modo que el logotipo Aircast quede sobre los dedos y el

2

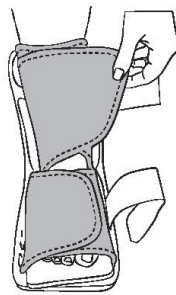


FIG. A

panel del pie esté situado dentro de la ortesis. La parte superior del panel debe fijarse al exterior de la ortesis (Fig. B). Sujete la correas, empezando por abajo (Fig. C). Apriételas hasta que queden ajustadas y no molesten.

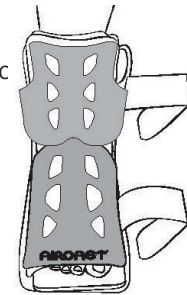


FIG. B

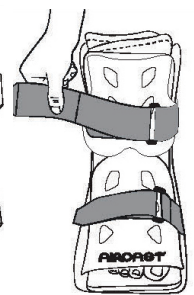


FIG. C

Ajuste la compresión de las celdillas neumáticas

Las celdillas neumáticas de la ortesis para caminar SHORT se entregan desinfladas

- Comience a inflarlas por el lado lesionado.
- Para inflar la celdilla neumática, coloque un dedo sobre el pequeño orificio que hay en la parte superior de la bomba de inflar grande que se encuentra en cualquiera de los lados de la ortesis (Fig. D). Bombee hasta que la celdilla neumática quede ajustada cómodamente.
- Repita en el otro lado. Bombee hasta que la celdilla neumática quede ajustada cómodamente.
- Si las celdillas neumáticas contienen demasiado aire, desínfelas.

3

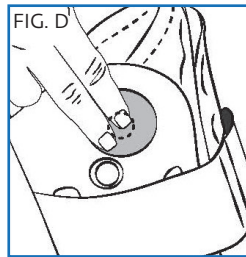
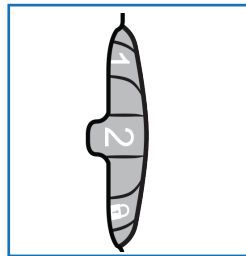


FIG. D

Desinflen las celdillas neumáticas

- Para desinflar las celdillas neumáticas, mantenga presionado el botón de liberación pequeño (Fig. E).
- Desinfe hasta lograr una presión con la que se sienta cómodo.

4

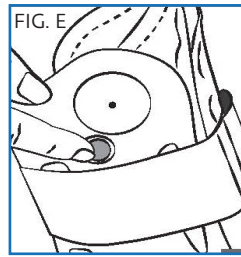


FIG. E

NOTA:

Desinfe las celdillas neumáticas antes de retirar la ortesis con el fin de lograr un ajuste adecuado al volver a colocarla.

La presión alta aumenta el soporte para caminar y la presión baja mejora la comodidad para sentarse o reclinarse. También puede ajustarse la presión, apretando o aflojando las correas.

GRAN ALTITUD:

A gran altitud, las celdillas neumáticas se expanden más allá de su nivel óptimo. Ajuste la presión de las celdillas neumáticas, apretando o aflojando las correas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Puede lavar el forro de espuma a mano con agua a 30 °C y un detergente suave, y ponerlo a secar. No lo introduzca en una Secadora ni utilice otra fuente de calor para Secarlo.

COMPONENTES MATERIALES

Bota Polipropileno
 Panel Frontal: Polietileno de alta densidad.
 Correas: Nylon
 Bombas de inflado: Termoplastico poliuretano.
 Forro Poliuretano/poliéster Foam externo/malla interna)
 Correas: Poliéster
 Suela exterior / Plantilla: EVA/ caucho sintético
 Dial Selector: Nylon
 No fabricado con látex de caucho natural.

PATENTED

DJO, LLC.

2900 Lake Vista Drive
 Dallas, TX 75067 | U.S.A.
 DJOGlobal.com/aircast



Copyright © 2019 by DJO, LLC

Los resultados individuales pueden variar. Ni DJO Global, Inc. ni ninguna de sus subsidiarias ofrecen consejos médicos. El contenido de este folleto no constituye asesoramiento médico, legal o de cualquier otro tipo. Consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si corresponde, que puedan ser adecuados para usted.